

Uso, manejo y limpieza de Caretas de Protección



Uso, manejo y limpieza de Caretas de Protección

Uso, manejo y limpieza de Caretas de Protección



Primera edición, San José Costa Rica

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo

Dirección: Avenida 9, Calles 3 bis y 5, Barrio Amón – San José.

Central Telefónica: 2211-0000

Web: www.invu.go.cr

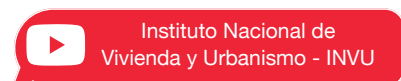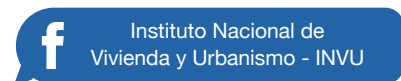

1. Reglas de uso




Fuente. Diseño del TEC.

- a) Esta careta constituye un equipo de protección, el cual puede ser utilizado cuando se tenga contacto cercano con otras personas. Sin embargo, este NO constituye una protección por sí misma, ni sustituye en ninguna forma los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud: lavado de manos, protocolo al toser o estornudar, no tocarse la cara y distanciamiento social (idealmente a 2 metros de otras personas), sino que es un complemento a las pautas requeridas para la prevención del COVID-19.
- b) El equipo es de uso personal, por lo cual se prohíbe el préstamo del equipo.
- c) Debe almacenarse en una bolsa plástica, preferiblemente de cierre hermético.
- d) No se debe escribir o pegar ningún elemento sobre la superficie acrílica del protector.
- e) No puede modificar la careta de ninguna manera.

2. Forma correcta de colocación



Al sujetar el dispositivo, es muy importante que la banda elástica quede inclinada y cerca de la oreja para dar una correcta separación entre la careta y la nariz.

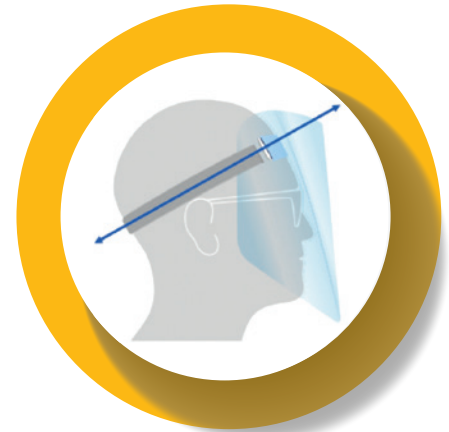

Fuente. Diseño del TEC.

- a) Si tiene el pelo largo debe sujetarlo mediante una cola o moño antes de la colocación de la careta.
- b) Lávese las manos con agua y jabón previo a la manipulación de la careta, o en su defecto utilice alcohol gel.
- c) Manipule la careta con las manos secas.
- d) Evite tocar de más el acrílico de la careta el momento de la colocación.
- e) El elástico de la careta debe quedar formando una diagonal detrás de las orejas, el elástico debe ajustar desde la frente hasta la parte posterior de la cabeza (cerca del cuello), como se presenta en la siguiente imagen:



Fuente. Diseño del TEC.

3. Retiro de la careta

- a) Lávese las manos con agua y jabón antes de retirarse la careta o en su defecto con alcohol gel.
- b) Manipule la careta con las manos secas.
- c) Retírese la careta por medio del elástico, desde la parte posterior a la frontal.
- d) Si la careta está visiblemente sucia (con probabilidad de contaminación) colóquese un par de guantes previo al retiro de la misma.



Fuente. Diseño del TEC.

4. Limpieza de la careta

- a) Para realizar la limpieza, primero debe lavarse las manos y posteriormente debe usar agua y jabón y secarla con papel toalla.
- b) Utilice una toalla de papel y alcohol al 70% o desinfectante para la limpieza del acrílico de la careta.
- c) Deseche de manera inmediata las toallas utilizadas en un basurero del baño o de la dependencia
- d) Deje secar (de ser necesario) y guárdela en la bolsa plástica destinada para la careta.
- e) La careta no debe ser aplastada o doblada en ningún momento de la manipulación o almacenamiento.



Descargue los
protocolos
COVID-19:



Dirección: Avenida 9, Calles 3 bis y 5, San José, Barrio Amón.
Central telefónica: 2211-0000
www.invu.go.cr